

MODE D'EMPLOI

Article N° : 44 504 00

POIRE VAGINALE ET RECTALE

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Prendre la poire à lavement et pomper un liquide. Puis introduisez la canule correspondante, vaginal ou rectale, et vaporiser. Nettoyer après chaque usage.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.

Ne pas rentrer la canule entièrement dans l'orifice.

Bien nettoyer après usage.

Ne doit pas être utilisé pour plusieurs personnes en même temps risque de contaminations si pas ou mal nettoyé après un usage uni-personnel.

Vérifier avant utilisation la propreté des embouts des canules.