

MODE D'EMPLOI

Article N° : 16 105 46 / 16 106 40 / 16 105 41

BRACELETS D'IDENTIFICATIONS

- 1/ Prendre un bracelet et inscrire le nom de la personne soit sur l'étiquette soit directement sur le bracelet, côté fenêtre, avec le feutre à écriture permanente.
- 2/ Insérer l'étiquette avec l'inscription du côté du plastique transparent jusqu'au bout et garder en main la partie détachable, détachez ensuite le bout détachable.
- 3/ Mettez le bracelet autour de la partie à identifier en gardant le côté transparent vers l'extérieur pour pouvoir lire le nom.
- 4/ choisissez la longueur voulue en insérant la pointe dans le trou choisi en fonction du diamètre de la partie à identifier.
- 5/ Rabattre le clip de fermeture sur le pignon en serrant fort jusqu'à entendre le bruit du clip de verrouillage. Vérifier si ce dernier est bien installé.
- 6/ Coupez si nécessaire la languette restante en prenant soin de ne pas laisser de bord coupant.
- 7/ Pour enlever le bracelet, coupez la languette avec des ciseaux adéquat.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé que par une personne compétente et qualifiée.

A utiliser en usage unique par personne.

Ne serrez pas le bracelet à fond mais laisser un espace suffisant, le bracelet doit toujours pouvoir bouger.

Ne pas laisser de bord tranchant.

Bien vérifier que le bracelet est fermé en tirant légèrement dessus et qu'il ne peut glisser hors du poignet .

Ne pas chauffer le dispositif ou le laisser sur la peau en contact serré et permanent ou sur des plaies ouvertes.