

MODE D'EMPLOI

Article N° : 42 920 40/41/45/46/47/48/49/50

GARROT CLIPCOMED PRO

Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins d'un membre pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine. Les conditions de désinfection et d'utilisation et de stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits contenant du caoutchouc dans les bandes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégralité des produits associés avant utilisation.



Appuyer sur 1 pour ouvrir le garrot

Créer une boucle puis refermer

Tirer sur la bande 2 pour serrer et garrotter

Appuyer sur l'arrière en tenant 3 pour activer la stase

PRECAUTION D'EMPLOI :

Vérifier avant utilisation que la bande ne présente pas de détériorations ou de coupures.
Ne jamais exposer à une température supérieure à 80°C. Respecter le mode d'emploi.