

MODE D'EMPLOI

Article N° : 33 400 01 / 33 400 02 / 33 400 03 / 33 400 04 / 33 400 05 / 33 400 06

ATTELLES DE STACK

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Prendre une attelle selon la dimension du doigt à traiter. Chauffer l'attelle à l'aide d'eau chaude ou d'une flamme. Former l'attelle lorsqu'elle est chaude pour l'adapter parfaitement au doigt. Enfiler l'attelle jusqu'à ce que le bout du doigt touche le fond de l'attelle. Fixer l'attelle au doigt en utilisant un sparadrap ou un velcro en enroulant ce dernier sur l'attelle dans sa partie supérieure.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utilisé et installé que par une personne compétente et qualifiée.
Vérifier avant utilisation que l'attelle soit en bon état.
Ce dispositif est uni personnel et ne doit pas être utilisé pour une autre personne.
Nettoyage possible au détergent ou à l'eau savonneuse.