



MODE D'EMPLOI

Article N° : 16 200 21 / 16 200 21E

BASSIN DE LIT

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Prendre le bassin sans couvercle et le glisser sous le patient allongé en prenant soin de ne pas le blesser, pour cela soulever légèrement le malade au niveau du postérieur. Bien positionner l'ouverture du bassin en dessous de l'orifice naturel. Remettre le couvercle après emploi. Bien vider et nettoyer après utilisation, si possible en machine.

PRECAUTION D'EMPLOI :

Ce dispositif ne peut être utiliser que par une personne compétente et qualifiée. Bien nettoyer après usage. Ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes en même temps. Risque de contamination si pas ou mal nettoyé après usage uni-personnel. Vérifier bien qu'il ne reste pas de traces au fond du bassin.

Le dispositif ne contient pas de mode d'emploi dû à son utilisation simple.