

Spray détergent désinfectant STERICID S-3DM

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel et des dispositifs médicaux non-invasifs.

Dispositif médical Classe IIa

Conditionnement

Spray 750ml avec dispenser moussant.
Carton de 6 sprays.

Actifs

Ethanol, Isopropanol, Chlorure de benzalkonium, Trideceth –7.

Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf *)

- Bactéricide EN1276*, EN13727, EN13697*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348* et EN14563* en 15mn.
- Fongicide EN14562* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697*, EN13624*, EN14562* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus* en 1 mn, Rotavirus* en 15 mn.

Mode d'emploi

Pulvériser STERICID sur la surface à désinfecter à une distance d'environ 30 cm.

Bien répartir le produit.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses. Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.

Précautions d'emploi :

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



CE

0459

Réf : S3DM

Fiche Technique. Version 11- 09/2016

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON
Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com