

## MODE D'EMPLOI

Article N° : 45 400 10R/ 25R/ 50R/ 99R

### PANIERES PORTE SERUMS

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE ( §13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Mettre le flacon dans le porte flacon le goulot vers le bas et raccorder le tube d'alimentation au flacon par ouverture. Accroché le porte flacon à un pied à perfusion ou à un autre support conforme aux règles de sécurité.

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Bien accrocher le porte flacon à sérum à son support.  
Après chaque utilisation, nettoyer et désinfecter les fils.  
Si le plastique est attaqué ou détaché ne plus utiliser le porte flacon, risque de rouille.  
Capacité de poids maximum 2 Kg.