



MODE D'EMPLOI

Article N° : 33 421 13 / 33 421 20 / 33 421 25 / 33 421 50 / 33 421 80 / 33 421 99

ATTELLE ALU/MOUSSE

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Choisir la largeur adéquate et couper l'attelle selon la longueur souhaitée.
Placer l'attelle en « sandwich » côté mousse sur la peau et sur la partie à immobiliser et faite la tenir avec du sparadrap.

PRECAUTION D'EMPLOI :

S'assurer qu l'attelles est bien propre et sèche. Ne pas découper les attelles avec de bords saillants ou pointus. Utilisable que par des personnes formées.