



# COMED



[WWW.COMED.FR](http://WWW.COMED.FR)

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 45 419 90

## PLATEAU INOX POUR PIEDS A SERUM

### Conseils du 26.04.2011 :

Ce plateau n'est pas conçu pour porter des objets ayant un poids supérieur à 2Kg. Répartir le poids des objets au centre du plateau en évitant les extrémités. Ne pas déplacer le pieds à sérum en tirant sur le plateau , éviter les chocs et ne pas s'appuyer sur le plateau.

Attention : Tout poids supérieur risquerait de provoquer une chute du plateau inopinée.

### Conseils du 15.03.2012 :

Avant utilisation, veillez à nettoyer le plateau sur le dessus et au-dessous en insistant bien sur les angles. Nous vous conseillons de vous aider d'un coton-tige et vous recommandons également de désinfecter le plateau.

---

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne seraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre médecin ou pharmacien. Si vous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimum , n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous [info@comed.fr](mailto:info@comed.fr) .