



MODE D'EMPLOI

Article N° : 45 400 05/ 45 404 05/ 45 410 05/ 45 410 06

PIED A SERUM BASE PLASTIQUE

Exigence essentielle de la directive 93/42/CEE (§13.1 de l'annexe I) :

« L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une exception est faite pour les dispositifs des classes I et IIa, s'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions. »

Accrocher les flacons à sérum ou les poches sur les crochets et régler la hauteur souhaitée par l'intermédiaire du tube coulissant en le serrant grâce à la poignée.
Si nécessaire bloquer le pied mobile en serrant les roues avec freins (2).

PRECAUTION D'EMPLOI :

Les crochets supportent un poids maximum de 2 Kg.
La hauteur maximum est de 2100mm.
Veillez à ce que la surface au sol soit plane ou inférieure à 5.7° (10%) de pente pour éviter le basculement.

MONTAGE DU PIED A SERUM :

Pour le montage, insérer le tube avec l'embout noir sur le pieds à 5 branches et fixez le tout par l'intermédiaire du boulon en mettant la rondelle en dessous du pieds.
Veillez nettoyer avant la première utilisation avec un produit nettoyant, les deux tubes inox et acier peint.
Vous disposez de 2 roues avec blocage. Nous vous conseillons une hauteur maximum de 210 cm à ne pas dépasser et une charge totale par crochets de 2 Kg.
La surface au sol doit être plane ou inférieure à 5.7° (10%) de pente pour éviter le basculement.

