

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0004344V
- Code GMDN : Non indiqué

- Règle appliquée (annexe IX)
- Non Invasif (règle 5 # 1)
 - Non Actif thérapeutique
 - Non chirurgical
 - Non Actif Médical
 - Non Actif diagnostique

Description générale	Pieds à sérum à 2 crochets inox pliable sur pieds à 3 branches non mobile pour porter les paniers porte-sérum ou poches.	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Non	
Dispositif Usage Unique	Non	
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Oui	Avec un produit n'attaquant pas l'aluminium ou le chrome, à l'eau savonneuse.
Substance impropre	Produit attaquant l'aluminium comme les substances acides. Produit attaquant le chrome ou l'inox	
Pièces constitutives	Oui	Mat : 3 tubes en aluminium 20 (dia) x 1 (épais) de 450mm (L) ; Épingle : Fil d'acier cuivré 2 passes Ø6mm ; Sandows : Polyamide noir ou rouge Ø6mm; Pied pliable 3 branches : Fer plat étiré écrou 16 x 3, assemblage par revers acier 5 x 20
Matières	Finition aluminium pour les tubes et chromé pour le trépied. Crochet en inox	
Contient du Latex	Non	
Rohrs	Non	
Étiquetage	Oui	Référence du produit et désignation ,CE ,nom.
Emballage	Oui	Unitaire sous sachet plastique
Stockage particulier	Non	
Marquage sur le DM	Non	Voir étiquette argentée
Références	45 400 00	
Désignation	Pied à sérum pliable Medicafoot	
Dimensions (cm)	Longueur Déplié et monté = 176 Longueur Plié = 56 Voir annexe	
Résistance température (C°)	Max = + 50; Min = -10	
Poids net (g)	1580	
Empattement au sol (cm)	49	
Poids de charge (kg)	Maximum : 1 par crochet	
Utilisation	Permet la suspension des paniers porte-sérum ou poches.	
Mode d'emploi	Déplier les 3 pieds en les relevant puis insérer le premier tube sur le pied ainsi que les autres tubes dans les précédents. Pour démonter, procéder en sens inverse. Housse de transport en coton en option	
Précaution d'emploi	Les crochets supportent un poids maximum de 1 Kg. Attention risque de basculement si sol non plat ou supérieur à une pente de 8%. Bien s'assurer que l'ensemble soit bien monté et bien stable.	
Recyclage/Récupération	Non/Dans les bac à métaux.	
DEEE/REACH	Non/Non	
Données de sécurité	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	
Normes applicables	NF EN ISO 9001: 2008 ; NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013; NF EN ISO 14971 : 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012; NF ISO 15223-2: 2010	

ANNEXE 1

