


<i>Description générale</i>	Oreiller ergonomique, mémoire de forme	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo,
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	La housse se nettoie en machine à 40°C et se sèche au tambour en température modeste, ne pas utiliser de produit chlorés. La mousse peut être nettoyé avec l'eau savonneuse, bien laisser sécher à l'air libre.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le polypropylène	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	L'oreiller, la housse à fermeture éclair et la housse en coton
<i>Matières</i>	Oreiller en Polyuréthane viscoélastique thermosensible, Housse avec fermeture à glissière en poly coton velours , Housse en coton	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans une boîte
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre 15 et 40°C
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	16 200 45	
<i>Désignation</i>	Oreiller	
<i>Dimensions Lo x la x h (cm)</i>	50 x 30 x côté haut = 10.7, côté bas = 8	
<i>Densité)</i>	45 kg/m ³ +/- 5%	
<i>Caractéristique</i>	Mousse non feu	
<i>Résistance température (C°)</i>	5 à 40°C	
<i>Poids net (g)</i>	490	
<i>Couleurs</i>	Housse à fermeture éclair = jaune cassé, Housse en coton = blanc, Oreiller = jaune pâle.	
<i>Utilisation</i>	La mousse à mémoire de forme permet de diminuer la compression et favorise la circulation des fluides de corps ce qui soulage de l'engourdissement et des tensions musculaire durant le sommeil. (anti-escarres). Mettre l'oreiller bien à plat et choisissez le coté de l'oreiller qui vous convient le plus selon votre grandeur.	
<i>Mode d'emploi</i>		
<i>Précaution d'emploi</i>	Ne pas enlever la housse coton intégrée. Pour ré-enfiler la housse en poly coton commencer par la partie basse de l'oreiller et la fermeture éclair du côté plat de l'oreiller, ne pas enfiler la housse sur la mousse humide ou non sèche. Si vous n'utilisez pas l'oreiller, le remettre dans sa gaine plastique à l'abris du soleil et dans un endroit sec et à des températures entre 15 et 40°C, bien à plat. Ne pas poser d'objet sur lui. Attention : Ne pas laisser le sac plastique à la portée des enfants, risque de suffocation.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des containers adéquates	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/ NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/ Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	

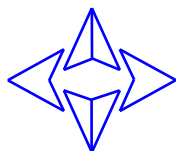

COMED

OREILLER ERGONOMIQUE MEMOIRE DE FORME

Mousse viscoélastique

Nous vous remercions d'avoir choisi l'oreiller ergonomique à mémoire de forme COMED. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'utilisations ainsi que des données techniques.

Cette boîte contient :

- Une protection plastique thermo-soudée de l'oreiller
- Une housse en polycoton velours à fermeture éclair
- Une protection coton
- Un oreiller
- Un mode d'emploi

Données techniques :

Réf. N° : 16 200 45

Dimensions de la boîte : 50 x 30 x 10.7 cm . Poids = 952 gr.

Dimensions de l'oreiller : 50 x 30 x côté haut = 10.7 cm côté bas = 8 cm Poids = 490 gr.

Matières : Polyuréthane viscoélastique thermosensible

Mousse non feu

Densité : 45 kg/m³ +/- 5%.

Housse en poly coton lavable avec fermeture éclair.

Couleur de la housse avec fermeture éclair : jaune cassé Couleur de la housse coton = blanc

Couleur de l'oreiller : jaune pâle

Mode d'utilisation :

La mousse à mémoire de forme permet de diminuer la compression et favorise la circulation des fluides du corps ce qui soulage de l'engourdissement et des tensions musculaires (effet anti-escarres).

La répartition uniforme de la pression sur l'ensemble de la surface de l'oreiller permet ce soulagement , les autres caractéristiques sont aussi importantes comme de mouler les contours corporels exactement et de retrouver sa forme originale après compression. Ce retour de forme est nécessaire pour retrouver un oreiller en forme original et donc de pouvoir l'utiliser dans d'autres positions sans qu'il soit déformé par la position précédente. L'oreiller COMED est donc toujours prêt à l'emploi.

Les oreillers COMED permet d'améliorer le sommeil en décontractant les muscles des épaules et du cou et ainsi d'assurer une détente optimale pendant la phase de sommeil et d'endormissement. De ce fait l'oreiller permet de réduire les maux de dos et les problèmes de sommeil.

Selon certaines analyses et sur certaines personnes , l'oreiller permet également de réduire les ronflements

Mettre l'oreiller bien à plat et choisissez le côté de l'oreiller qui vous convient le plus selon votre grandeur.

La housse à fermeture éclair se nettoie à la machine à 40°C et se sèche au tambour en température modeste , ne pas utiliser de produits chlorés. Vous n'avez pas besoin de nettoyer la mousse si vous utilisez la housse en poly coton (recommandé) néanmoins vous pouvez nettoyer la mousse à l'eau savonneuse , bien laisser sécher à l'air libre. Ne pas enlever la housse coton intégrée. Pour ré-enfiler la housse en poly coton commencer par la partie basse de l'oreiller et la fermeture éclair du côté plat de l'oreiller , ne pas enfiler la housse sur de la mousse humide ou non sèche.

Si vous n'utilisez pas l'oreiller , le remettre dans sa gaine plastique à l'abri du soleil et dans un endroit sec et à des températures entre 15° à 40° C , bien à plat. Ne rien poser sur lui , comme un objet lourd.

Attention = Ne pas laisser le sac plastique , qui n'est pas un jouet , à la portée des enfants , risque de suffocation.

COMED sarl , 3 Rue Alfred Kastler Z.A. Eckbolsheim , F-67087 STRASBOURG CEDEX 02 France tél. : (33) 03 88 77 13 00
Fax : (33) 03 88 77 00 70 www.comed.fr E-mail = info@comed.fr Mise à jour le :05.12.2011