

<i>Description générale</i>	Lampe stylo avec porte abaisse langue	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon sec
<i>Substance impropre</i>	Substance attaquant l'acier inoxydable	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	2 piles (R03P UM4 1.5V SIZE AAA), une ampoule (à optique de 2.5 V – 0.3 A – E 10) et un porte abaisse langue
<i>Matières</i>	Acier inoxydable, porte abaisse langue en plastique	
<i>Contient du Latex</i>	Non	
<i>Etiquetage</i>	Non	
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un blister à l'unité
<i>Stockage particulier</i>	Non	Sec et Propre
<i>Marquage sur le Dispositif</i>	Oui	COMED + logo
<i>Références</i>	24 671 10	
<i>Désignation</i>	PEN-WHITE avec porte abaisse langue	
<i>Dimension Lo x Ø (mm)</i>	140 x 12	
<i>Résistance température (C°)</i>	-5 à 40°C	
<i>Poids net (g)</i>	37	
<i>Couleurs</i>	blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant un éclairage puissant et bien circonscrit pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux.	
<i>Mode d'emploi</i>	Insérer les piles et visser l'ampoule, appuyer sur le bouton presseur pour allumer l'ampoule.	
<i>Précaution d'emploi/ avertissement usage unique</i>	Ne pas mettre en contact avec un liquide (eau). Ne pas utiliser pour un examen des yeux.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Bac DEEE	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui /Non	
<i>Phthalates/PVC</i>	Non /Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	