

- Classement du dispositif : NON DISPOSITIF MEDICAL
- N°. d'enregistrement ANSM : NON
- Code GMDN : NON

Règle appliquée : Article et qualification Non DM par l'ANSM en 11/09 " car elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins médicales sur l'humain au regard des article L5211-1 et R5211-1 du code de la santé publique

<i>Description générale</i>	Pèse personne électronique « LCD Blanc» .	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon humide ou une eau savonneuse, sans nettoyant
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le plastique	
<i>Matières</i>	Plastique	
<i>Etiquetage</i>	Non	Sur l'emballage : Dénomination, EKS, capacité, graduation, 4 capteurs actifs, garantie, recyclage, CE (directive 2014/30/UE (CEM)), pile, code barre
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre, température entre 10 et 35°C
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	EKS, poids maximum et graduation.
<i>Références</i>	45 721 45	
<i>Désignation</i>	Pèse personne LCD Blanc	
<i>Dimension Lo x la x h (mm)</i>	265 x 273 x 25	
<i>Dimension écran (mm)</i>	65 x 30	
<i>Capacité (kg)</i>	150	
<i>Graduation (kg)</i>	0.1	
<i>Unités</i>	Kg / Lb /St	
<i>Alimentation</i>	1 pile lithium CR2032	
<i>Résistance température (C°)</i>	10 et 35°C	
<i>Poids net (Kg)</i>	0.972	
<i>Couleurs</i>	Blanc	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de peser des personnes debout.	
<i>Mode d'emploi</i>	Retirer la languette de la pile et choisir l'unité de pesage au dos de la balance. Appuyer sur la balance et attendre que « 0.0 » apparaisse sur l'écran. Poser les pieds à plat sur le plateau de la balance et lire le poids affiché sur l'écran.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Ne pas cogner, ou laisser tomber un objet dessus. Éviter la surcharge. Ne pas stocker ou utiliser dans un endroit mouillé ou humide. Ne pas entasser divers objet par dessus. Ne pas immerger dans de l'eau ou quelconque liquide. Ce pèse personne dénommé de classe IV ne convient pas à un usage médical ou de diagnostic. Il sert uniquement à déterminer un poids de référence par rapport au poids de la propre personne pesée. Une différence peut être constaté avec un autre pèse personne.	
<i>Recyclage</i>	Oui	
<i>Récupération</i>	Dans les bacs à déchet électrique et électronique	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui/NC	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	