

<i>Description générale</i>	Ruban Body Mass Index (BMI) la traduction française signifie Indice de Masse Corporelle (IMC). Dispositif non médical.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec une eau savonneuse ou détergent.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'ABS	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Boîtier en plastique ABS et ruban en plastique souple	
<i>Standard fabrication</i>	S.O.	
<i>Étiquetage</i>	Non	Inscription directement sur le boîtier avec graduation
<i>Emballage</i>	Oui	Dans un sachet individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre
<i>Marquage sur le Dispositif</i>	Non	
<i>Références</i>	44 444 60	
<i>Désignation</i>	Ruban BMI	
<i>Dimensions du triangle (mm)</i>	Équilatéral = 90 mm de chaque côté	
<i>Hauteur (mm)</i>	25	
<i>Longueur du ruban (mm)</i>	Environ 2 mètres	
<i>Épaisseur du ruban (mm)</i>	0.15	
<i>Résistance température (C°)</i>	- 10 à +40° C	
<i>Poids net (g)</i>	77	
<i>Couleurs</i>	Boîtier = blanc, Ruban plage = blanc, vert, orange, rouge indiquant les zones critiques	
<i>Utilisation</i>	Dispositif indiquant le rapport entre votre poids et votre taille, permet de situer un IMC par rapport aux recommandations de santé.	
<i>Mode d'emploi</i>	Pour calculer le poids idéal, on utilise des formules ci-dessous, avec T, votre taille en m et P votre poids en kg. Pour la femme : $P = T - 100 - (T - 150) / 2$ Pour l'homme : $P = T - 100 - (T - 150) / 4$ $BMI (IMC) = P(kg) / T(m)^2$ Idéalement, BMI (IMC) = 20.8 pour la femme et BMI (IMC) = 22 pour l'homme, (BMI normal entre 20 et 25)	
<i>Précaution d'emploi</i>	Le BMI ne tient pas compte de la masse grasse et de la masse maigre. Ne convient pas pour une utilisation chez les enfants.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Oui/dans des containers à plastique	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>	Non/Non	
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	