



<i>Description générale</i>	Lame circulaire pour scie à plâtres	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Stérilisation</i>	Oui	Tous modes
<i>Autoclavable</i>	Oui	134° C pendant 18 minutes
<i>Nettoyage</i>	Oui	Eau + nettoyant ménager ou qui n'attaque pas l'acier
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Substances attaquant l'acier	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	Acier	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Référence, lot, COMED, dénomination 7 langues
<i>Emballage</i>	Oui	Individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit sec et propre
<i>Durée d'utilisation</i>	Courte	
<i>Marquage</i>	Oui	Référence, COMED
<i>Références + extensions</i>	47 300 55	47 300 70
<i>Désignation</i>	Lames pour scie 47 300 03	
<i>Diamètre (mm)</i>	50	65
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	7	13
<i>Couleurs</i>	Acier	
<i>Résistance température (°C)</i>	-10 à +50°C	
<i>Utilisation</i>	Article permettant de couper le plâtre avec une scie électronique	
<i>Mode d'emploi</i>	Prendre une lame et la monter sur la scie à plâtres du modèle correspondant. Se conformer au mode d'emploi de la scie à plâtres pour le montage et le démontage de la lame.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	L'efficacité de la lame dépend de son usure, vérifier que les dents soient encore bien piquantes et coupantes. Ne jamais utiliser une lame usée ou détériorée, risque de dégâts importants de la scie. A monter que par une personne habilitée ou formée, compétente et ayant reçue une formation préalable. Risque de coupures pour une personne non formée.	
<i>Recyclage</i>	Non	
<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets ménagers	
<i>Latex/Antistatique</i>	Non/Non	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non	
<i>RoHs</i>	NC	