



<i>Description générale</i>	Pilulier hebdomadaire	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Oui	
<i>Code ACL</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Eau + nettoyant ménager
<i>Substance(s) impropre(s)</i>	Substances attaquant le plastique (ABS, PS, PP)	
<i>Pièces constitutives</i>	Non	
<i>Matières</i>	ABS, PS et PP	
<i>Etiquetage</i>	Oui	Sur la boîte : Référence, lot, COMED, dénomination 7 langues
<i>Emballage</i>	Oui	Individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Dans un endroit sec et propre à l'abris du rayonnement du soleil
<i>Durée d'utilisation</i>	Temporaire	
<i>Marquage sur le DM</i>	Oui	Logo Comed + jours de la semaine + « Matin/Midi/Soir/Coucher »
<i>Références + extensions</i>	16 200 56	
<i>Désignation</i>	Pilulier hebdomadaire	
<i>Dimensions L x l x H (mm)+- 3mm</i>	115 x 43 x 128	
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	171	
<i>Couleurs</i>	Blanc et bleu	
<i>Résistance température (°C)</i>	-10 à +40°C	
<i>Utilisation</i>	Article permettant de préparer et d'organiser des comprimés jusqu'à 4 prises par jour pendant 7 jours.	
<i>Mode d'emploi</i>	Retirer les piluliers de leur support par l'orifice situé en bas du support et remettre les piluliers dans leur support en les insérant dans l'orifice situé en haut du support. Faire coulisser le couvercle des piluliers, déposer les comprimés dans les cases correspondantes et refaire coulisser le couvercle pour refermer le pilulier.	
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	La préparation ne peut se faire que par une personne informée et avertie, risque d'administration du mauvais traitement en cas de mauvais usage.	
<i>Recyclage</i>	Non	

<i>Récupération</i>	Dans les bacs de déchets ménagers
<i>Latex/Antistatique/Bishenol A</i>	Non/Non/Non
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Non
<i>RoHs</i>	NC
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul                      Combinaisons de phrases = Nul